

Peristeen®

Peristeen® Analpropp

For personer med avføringsinkontinens

Peristeen Analpropp fordeler:

- Forhindrer avføringslekkasje
- Laget av et mykt og luftgjennomtrengelig skummateriale
- Sitter trygt og stabilt under bruk

Uten
lateks, PVC
og silikon



Peristeen Analpropp

Peristeen Analpropp er et enkelt og effektivt hjelpemiddel for personer med avføringslekkasje. Proppen forhindrer lekkasje og reduserer lukt, og gir økt frihet og trygghet i hverdagen – også ved aktiviteter som bading og svømming. Analproppen føres inn som en stikkpille.

Mykt materiale

Peristeen Analpropp er laget av et mykt og luftgjennomtrengelig skummateriale.

Enkel i bruk

Proppen er enkel å sette inn. Peristeen Analpropp er pakket i en vannoppløselig film for enkel innføring. Den løser seg opp og utvider seg når den kommer i kontakt med varme og fuktighet fra tarmen. Det dannes en effektiv barriere som forhindrer lekkasje og reduserer risikoen for hudirritasjon og lukt.

Proppen kan brukes i opptil 12 timer, noe som gir fleksibilitet i hverdagen.

To størrelser

Peristeen Analpropp fås i to størrelser: Small og Regular. Det anbefales å prøve begge størrelser for å finne frem til den som har best effekt. Du kan gjerne bruke en liten mengde gel på tuppen for enklere innføring.


Skal ikke brukes ved

- Anal stenose
- Hemoroider (3. og 4. grad).




Veiledningsfilm ved bruk av
Peristeen Analpropp

Steg for steg

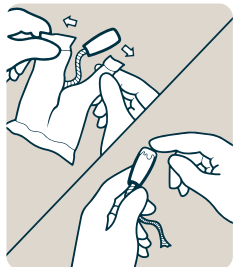


1. Forberedelse

Vask hendene og ta proppen ut av emballasjen. Påfør en liten mengde Peristeen Analpropp gel på tuppen av proppen. Gelen følger med i esken, men andre smøremidler kan også benyttes.

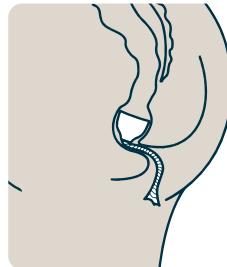


3. Bruk

Proppen er nå riktig plassert, og vil etter kort tid ekspandere seg til full størrelse når den vannoppløselige filmen kommer i kontakt med den naturlige varmen fra fuktigheten i endetarmen. Proppen kan sitte inne i inntil 12 timer

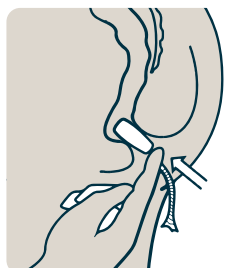

2. Innføring

Slapp av og skyv Peristeen Analpropp forsiktig inn forbi endetarms-åpningen, analsfinkteren, helt til hele proppen er inne i endetarmen. Gastråden skal være på utsiden av kroppen.

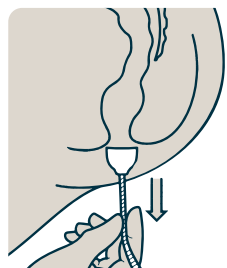

4. Fjerning

Proppen fjernes fra endetarmen ved å trekke i gastråden. En ny analpropp kan settes inn umiddelbart etter at den gamle er fjernet. Kast den brukte analproppen i restavfallet – ikke i toalettet.

Reseptforskriving: Hjemmel 501

Varetekst	Art.nr. Coloplast	Art.nr. Farmalogg	Lengde	Diameter	Diameter utfoldet	Antall i esken
Peristeen Analpropp, Small	1450	896969	26 mm	12 mm	37 mm	20 stk.
Peristeen Analpropp, Regular	1451	896977	26 mm	13 mm	45 mm	20 stk.