

Peristeen® Light Steg for steg veiledning

Bruerveiledning for lavvolum transanal irrigasjon - TAI



Peristeen® Light

Om Peristeen Light

Peristeen Light er et lavvolum system som kan hjelpe deg med utfordringer som avføringslekkasje, tømning utfordringer og/eller forstoppelse. Peristeen Light består av en gjenbrukbar vannbeholder og konkateter for engangsbruk. Vannbeholderen fås i to størrelser, 175 ml og 250 ml. Den største størrelsen inkluderer også en forlengingsslange som kan brukes etter eget ønske.

1

Lokket er designet for å dekke hele vannbeholderen slik at det er enkelt å åpne.

2

Peristeen Light har en tilbakeslagsventil for å unngå at tarminnhold kommer inn i vannbeholderen.

3

Konkateteret har en avrundet form med to kateterøyne og en glatt overflate som aktiveres med vann før bruk. Det gir en skånsom innføring i endetarmen.

4

Forlengingsslangen er 70 cm lang og kan benyttes etter eget ønske. Den følger med produktet som rommer 250 ml vann og har like konnektorer i begge ender for intuitivt bruk. Forlengingsslangen kan benyttes inntil 30 ganger.

5

Vannbeholderen er enkel å holde og klemme. Den er praktisk i bruk hjemme og når du er på farten. Vannbeholderen kan brukes inntil 30 ganger.



Peristeen Light steg for steg

Oppstart

Det kan være enklere å irrigere hvis du tømmer blæren først.

Steg 1

Åpne lokket på vannbeholderen og fyll den med lunke vann (34-40°C). Dersom vannet er for varmt kan det skade tarmen, og hvis vannet er for kaldt kan det forårsake kramper. Ta konkateteret ut av pakningen og fest det til lokket.



Steg 2

Forlengingsslange for 250 ml


Gjelder kun ved bruk av forlengingsslange med vannbeholder som rommer 250 ml. Ta konkateteret ut av pakningen og fest det på slangen. Fest den andre enden av forlengingsslangen på lokket.



Steg 3

Fukt konkateteret før bruk og fjern luft

Hold konkateteret noen sekunder under rennende vann for å aktivere belegget. Klem forsiktig på vannbeholderen helt til det kommer vann ut fra konkatetertuppen. Bruk konkateteret innen 2 minutter. Det er ikke anbefalt å bruke smøremiddel på konkateteret.

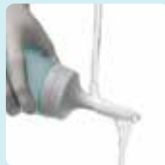

Steg 4

Innføring - irrigasjon - tømming

Hold i vannbeholderen og før konkateteret forsiktig inn i endetarmen. For å starte irrigasjonen klemmer du på vannbeholderen så vann føres inn. Fjern konkateteret mens du sitter på toalettet. Avføring og vann kommer ut.



Steg 5

Etter bruk

For å fjerne konkateteret fra beholderen, bruk et papir. Legg konkateteret tilbake i pakningen. Kastes i restavfallet.



Steg 6

Tøm og tørk av vannbeholderen

Åpne lokket og tøm ut resterende vann fra vannbeholderen og forlengingsslangen dersom du bruker den. Vask utsiden av vannbeholderen med mild såpe og vann. Tørkes av med papir eller håndkle. Oppbevar vannbeholderen med lokket åpent. Forlengingsslangen henges til tørk dersom du bruker den.



Les alltid bruksanvisningen som ligger sammen med produktene før bruk.
www.coloplast.no



Coloplast | Assistanse

Hvis du har behov for hjelp eller veiledning, ta kontakt med våre sykepleiere på telefon:

22 57 50 20

mellom kl. 08.00-16.00 på hverdager.

Få mer informasjon

På vår hjemmeside www.coloplast.no kan du lese mer om våre produkter.

Sortimentoversikt

Art.nr Coloplast / Farmalogg	Produktbeskrivelse
29171 / 948011	Peristeen Light 175 ml 1 vannbeholder, 30 konkater
29181 / 841855	Peristeen Light 250 ml 1 vannbeholder, 30 konkater og 1 forlengesslange

Reseptforskriving Peristeen Light

Hjemmel 501

Analirrigasjonssystem: 5010504

Les bruksanvisningen for alle detaljer om indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler.



Se instruksjonsfilm med Peristeen Light 175 ml uten forlengesslange.



Se instruksjonsfilm om Peristeen Light 250 ml med forlengesslange.

Coloplast Norge AS, Postboks 162, Manglerud, 0612 Oslo. Telefon 22 57 50 00.
Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast AS. ©2025-03. Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast AS, 3050 Humlebæk, Danmark. Nr. 440N00547, PM-30364