



Nyhet

SpeediCath® Navi
Et mykt kateter med
en fleksibel tupp

SpeediCath® Navi




SpeediCath® Navi er et mykt kateter med en fleksibel tupp og gripehåndtak

Den fleksible tuppen og mykheten til kateteret bidrar til skånsom innføring og jevn passasje gjennom de naturlige kurvene og bøyningene i mannens urinrør. Gripehåndtaket gjør det myke kateteret lett å håndtere ved innføring.

Helt klart
til bruk



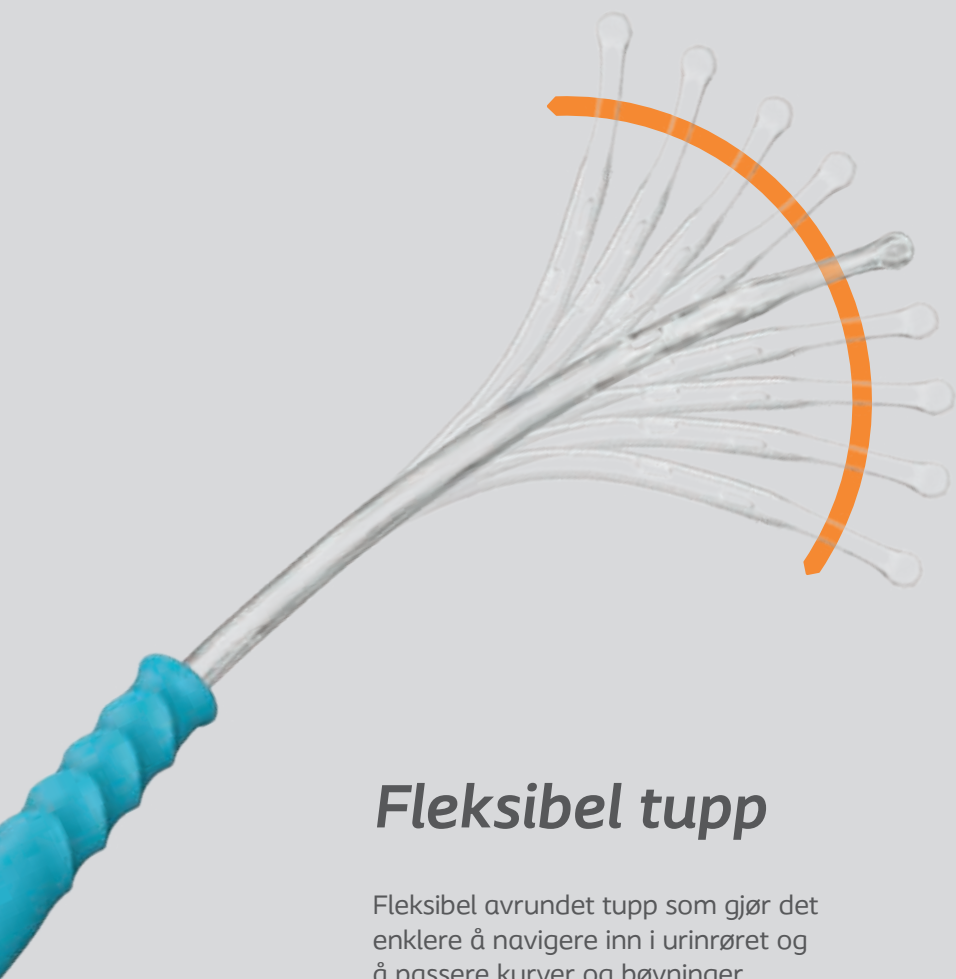

Fleksibel tupp


Fleksibel avrundet tupp som gjør det enklere å navigere inn i urinrøret og å passere kurver og bøyninger.

Gripehåndtak

Gripehåndtaket brukes til å føre inn kateteret på en hygienisk og kontrollert måte. Det er designet for å gi et sikkert grep om kateteret, samtidig som den belagte overflaten holder seg glatt.




Brukerveiledning

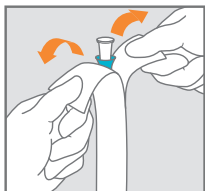


Åpne pakningen

Trekk flikene fra hverandre for å åpne pakningen.

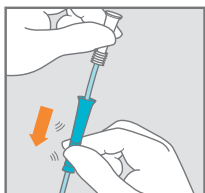


Bruk av kateter

Hold i det turkise gripehåndtaket når kateteret tas ut av pakningen og trekk det ned fra konnektoren.

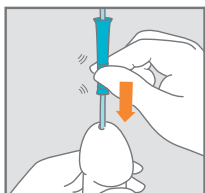

Kateteriser

Katetertuppen føres inn ved hjelp av gripehåndtaket. Fortsett trinnvis ved å klemme og slippe håndtaket ved innføring.

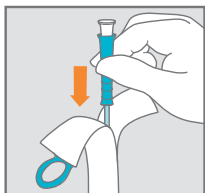

Avfallshåndtering

Etter bruk legges kateteret tilbake i pakningen og kastes i vanlig restavfall.

Sortimentoversikt

Effektiv kateterlengde	CH størrelse	Antall pr. eske	Art. nr. Coloplast	Art.nr. Farmalogg
33 cm	10	30	290100	935191
33 cm	12	30	290120	827960
33 cm	14	30	290140	980932
33 cm	16	30	290160	874335

Reseptforskriving

Forbruksmateriell ved urinretensjon.

Reseptkode 502.

Scann QR-koden for å se en brukerveiledningsfilm om SpeediCath Navi.



Coloplast utvikler produkter og tjenester som gjør livet enklere for mennesker med personlige medisinske behov. Vi samarbeider tett med brukere av våre produkter og utvikler løsninger tilpasset deres behov.

Våre forretningsområder inkluderer stomi, urologi og kontinens, hud- og sårpleieprodukter. Vi er et internasjonalt selskap med over 18 000 ansatte.