


Peristeen® Plus transanal irrigasjon med ballongkateter

brukerveiledning for barn



Peristeen® Plus


Forberedelse

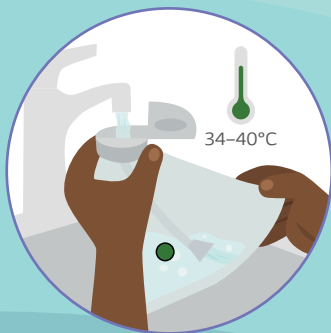

1. Åpne lokket på vannposen. Fyll vannposen helt med lunkent vann (34-40°C). Vanntemperatur indikatoren blir grønn når vannet har rett temperatur.



2. Sett på slangen med den grå konnektoren på skrutoppen ved å plassere den tykkeste slangen i det store hullet og den tynneste slangen i det lille hullet. Press dem sammen og vri i klokkeretning for å låse konnektorene.

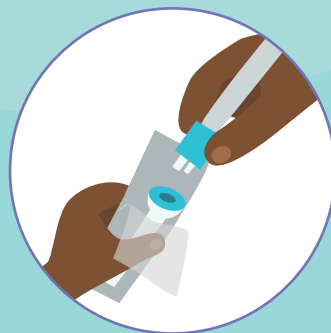


3. Koble til den ene enden av slangen med turkis konnektor til kontrollenheten ved å sette den store slangen inn i det store hullet og den lille slangen i det lille hullet. Sett den andre enden av slangen med turkis konnektor på ballongkateteret. Vri konnektoren for å låse.




4. Vri bryteren til det turkise vannsymbolet. Pump forsiktig vann inn i kateterpakningen. Vri bryteren til det hvite ballongsymbolet for å stoppe vannet. La kateteret ligge i vann i minst 30 sekunder. Du kan også telle sakte til 10 før det brukes.



Innføring av kateter

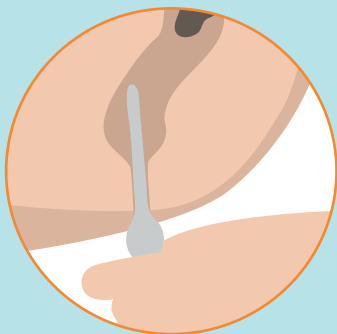


5. Mens du sitter på toalettet: Hold kateteret i gripefeltet, under det turkise merket. Før kateteret forsiktig inn i endetarmen, slik du er fortalt av helsepersonell. Møter du motstand ved innføring, fjerner du kateteret og tar kontakt med helsepersonell eller Coloplast® Assistanse for veiledning.

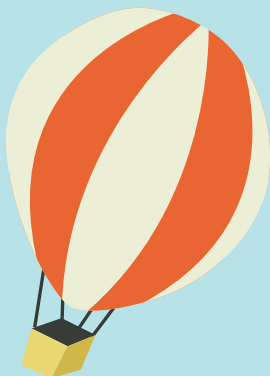

Luft i ballongen



6. Når kateteret er innført, pump for å fylle luft i ballongen. Pump så mange ganger som anbefalt av helsepersonell:

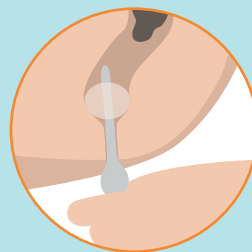


7. Dra forsiktig i kateteret for å forsegle endetarmsåpningen. Fingergrepet skal være på utsiden av kroppen.

(Maksimum 2 pump for SMALL kateter og 4 pump hvis du bruker et REGULAR.)




Pumpe vann

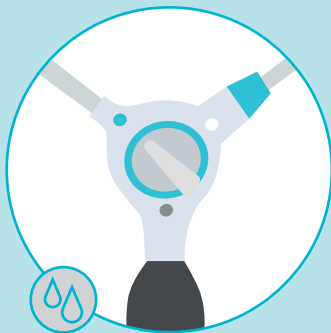

8. Vri bryteren ved å følge sirkellinjen til det turkise vannsymbolet. Pump sakte inn vann. Helsepersonell vil anbefale mengde vann. _____ ml.

Fjerning av kateteret

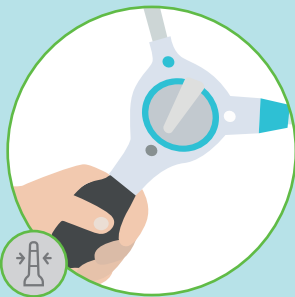

9. Når anbefalt mengde vann er ført inn, vri bryteren til det grå tømning av luftsymbolet. Fjern kateteret fra endetarmen. Det kan være at vann og avføring kommer ut umiddelbart, andre ganger kan det ta lengre tid.

Tømming av tarmen



10. Bli sittende på toalettet helt til du er ferdig med å tømme tarmen for vann og avføring. Et tips kan være å massere magen og lene seg fremover for enklere tarmtømming. Det er veldig individuelt hvor lang tid det tar å tømme tarmen. I snitt tar det ca. 30 minutter.




Rengjøring



11.
Vri og ta av kateteret som kastes i vanlig husholdningsavfall.




12.
Vri bryteren til det turkise avslutt- og lagresymbolet. Heng kontrollenheten og slangene til tørk. Unngå knekk på slangene når du legger det bort. Avslutt med å vaske hendene.

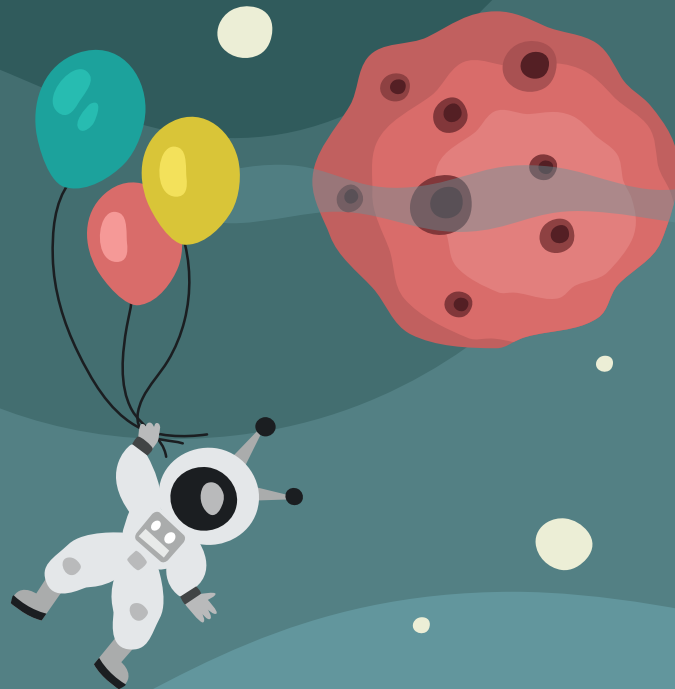

Peristeen® Plus



Symboler på kontrollenheten

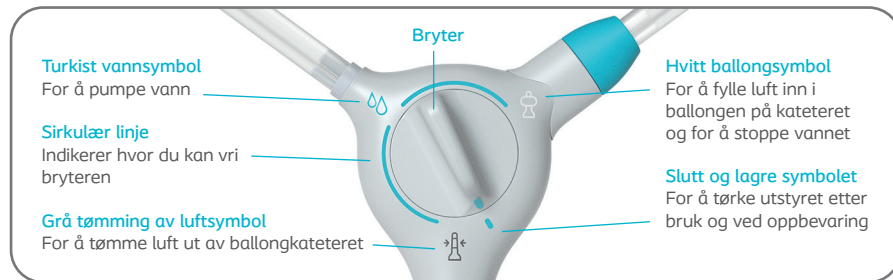

1. **Skrutopp (inkludert lokk)**
Erstattes etter 90 gangers bruk.
Husk å holde i lokket når du bytter vannposen
2. **Vannpose inkludert temperaturindikator**
Skiftes etter 15 gangers bruk
3. **Kontrollenhet**
Skiftes etter 90 gangers bruk eller ved behov
- 3a. **Pumpe for fylling av ballong og ved pumping av vann**
- 3b. **Bryter for å regulere luft og vann**
4. **Slanger**
Skiftes etter 90 gangers bruk
5. **Belagte ballongkatetre**
Kun for engangsbruk
6. **Festebånd**
Byttes når elastisiteten blir forringet
7. **Toalettveske***
For oppbevaring av utstyret.

* Toalettmappe fås gratis ved å ta kontakt med Coloplast Assistanse, telefon 22 57 50 20.

Toalettmappens design kan variere.

Behov for assistanse?

Hvis barnet ditt har noen utfordringer, om de er små eller store, anbefaler vi å lese bruksanvisningen som følger med i Peristeen Plus systemet. Hvis du ikke finner svaret du leter etter, ta kontakt med helsepersonell eller Coloplast® Assistanse på telefon 22 57 50 20.



Min kontaktperson:

Navn

Telefon



Les bruksanvisningen som følger med utstyret før bruk.

Tre enkle måter å komme i kontakt med Coloplast® Assistanse:



Snakk med en Coloplast Assistanse sykepleier på telefon 22 57 50 20



Send en e-post til assistanse@coloplast.com



Besøk oss på www.coloplast.no



Se våre animasjonsfilmer om bruk av Peristeen® Plus



Alle som registrerer seg får tilsendt et gratis hygienesett

[Ostomy Care](#) / [Continence Care](#) / [Wound & Skin Care](#) / [Interventional Urology](#)

Coloplast Norge AS, Postboks 162, 0612 Oslo. Telefon 22 57 50 00.

www.coloplast.com Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S© Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S 2021-04 Nr. 440N00454 PM 16512