

Hverdagen med urostomi



Kundeservice og
produktveiledning på telefon

22 57 50 20

man - fre 9-16



Trine, sykepleier i Coloplast

Coloplast®
Assistance

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S
Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark



Coloplast Norge AS
Postboks 162 Manglerud
0612 Oslo
Telefon 22 57 50 00
www.coloplast.no

Innhold

Forord	3
Urinveissystemet	4
Hva er en urostomi?	5
Kan jeg leve som før?	6
Hudpleie og stomistell	11
Enkelt stomiskift	12
Stomitolbehør	17
Hudpleietips	17
Trening etter en stomioperasjon	18
Egne notater	19
Motta Assistance	23

Forord

Denne brosjyren er utarbeidet for deg som skal stomiopereres eller som nylig har fått en urostomi.

Hovedhensikten med brosjyren er å gi deg en innføring i hva en stomi er, hvordan du stiller stomien, og setter på bandasje. Vi ønsker å skape forståelse for at du kan leve et normalt liv med en stomi.

Brosjyren er en del av et undervisningsprogram for stomiopererte og kan benyttes i pre- og postoperativt informasjonsarbeide.


Ønsker du mer detaljert og utfyllende informasjon om et spesielt emne, ber vi deg kontakte de respektive ressurspersonene på dette fagområdet.

Urinveissystemet


Urinorganene består av nyrene og urinveiene, som omfatter urinledere, urinblæren og urinrøret. Urinen dannes i nyrene. Den ledes bort fra nyrene gjennom urinlederne og ned i urinblæren. Herfra tømmes urinen ut gjennom urinrøret. Ved en urostomi ledes urinen gjennom urinlederne og ut gjennom bukveggen via et tarmstykke.

Nyrene er plassert i bukhulen på høyde med 12. ribbein. Det produseres urin hele døgnet. Den oppbevares i urinblæren som er plassert like over symfyen. En voksen person produserer fra 1 til 1,5 liter urin, men ved en fyllingsgrad på 100 – 300 ml i blæra oppstår vannlatingstrang.


Normal urin har en pH-verdi på 5-6, hvilket vil si at den er lett sur og normalt ikke skadelig på huden.

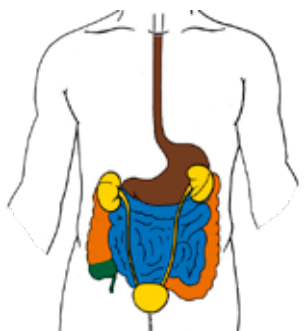

Illustrasjon av urinorganer

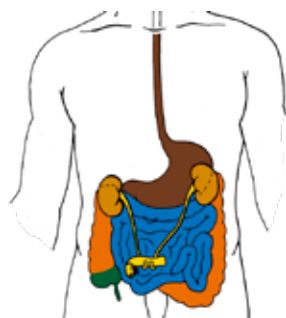

Illustrasjon av urinorganer med en urostomi

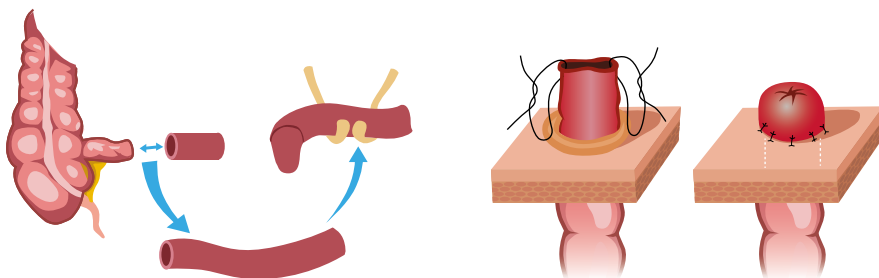

Illustrasjon av en urostomioperasjon/anleggelse

Hva er en urostomi?

Stomi = åpning

En urostomi er en åpning på magen hvor urinen ledes ut.

Hvorfor anlegger man en urostomi?

Den mest vanlige årsaken er kreft i urinblæren.

Årsakene kan også være:

- Medfødte misdannelser
- Ødelagt nerveforsyning til urinblæren (inkontinens)
- Nevrologiske sykdommer som f.eks. multippel sklerose, MS
- Stråleskader
- Skader (ulykker)

Hva skjer?

- Den vanligste operasjonsmetoden for urinavledning er Brickerblæren
- Urinblæren opereres som oftest bort
- Du får et operasjonssnitt på magen, samt en stomi
- Brickerblæren konstrueres ved at det isoleres et stykke av tynntarmen (se side 4)
- Urinlederne sys inn i dette tarmstykket som igjen føres ut gjennom bukveggen som en stomi.
- Stomien legges oftest ut på høyre side av magen.
- Stomiens lengde bruker å være ca. 2-3 cm
- Like etter operasjonen er stomien hoven. Dette vil forandre seg etter noen uker, og stomien vil få en frisk

rødfarge. Du føler ikke smerter i stomien.

- I enkelte tilfeller legges urinlederne direkte frem på magen. Dette kalles ureterostomi.

Kan jeg kontrollere min urinavgang?

- Urin kommer ukontrollert hele døgnet.
- Urinen samles opp i stomiposen du har festet på magen.
- Du vil oppleve at urinen inneholder slim fra tarmbiten. Dette er helt normalt.
- For at posen ikke skal bli for full i løpet av natten, kan stomiposen kobles til en urinpose med slange (nattpose).
- Denne kan henges på sengekanten eller legges på gulvet.

Alternativer til urostomi

Enkelte pasienter tilbys blæresubstitutt, der urinledere er festet til en blære laget av tarm, som igjen er koblet til urinrør.

Noen pasienter kan tilbys Kocks reservoir. Det vil si at kirurgen konstruerer et reservoir av tarmen innenfor bukveggen. Dette reservoaret tømmes ved hjelp av et kateter via en åpning på magen. Din lege eller stomisykepleier kan gi deg råd og informasjon om urostomi og ulike alternativer.

Kan jeg leve som før?

Tiden etter en stomioperasjon kan være tung, men gradvis vil du oppdage at det er mulig å leve et normalt liv. Jo raskere man kommer tilbake til normalt liv, jo bedre. Stomien din burde ikke være til hinder for dine fritidsinteresser, aktiviteter og jobb. De fleste lærer seg raskt hvordan de skal stelle stomien sin og kommer seg snart tilbake til hverdagen.

Fritid

Dine fritidsinteresser og aktiviteter kan du fortsette med som før operasjonen. Graden av aktivitet bestemmer du selv etter hvordan du føler deg. Selve stomien hindrer deg ikke i å f.eks. mosjonere. Å gå ut på korte turer, som du gradvis forlenger vil være veldig godt for kroppen og magemusklene.

Det går fint an å bade i sjøen eller i svømmehallen, ta badstu eller sole seg. Vær oppmerksom på at vann, varme og svette kan føre til at stomiutstyret får redusert klebeevne, og må skiftes oftere enn vanlig.

Reise

Reise kan du gjøre som vanlig, men husk å ta med ekstra stomiutstyr. Ha stomiposene i håndbagasjen i tilfelle kofferten forsvinner underveis. Man kan også ta med ekstra tilbehørsprodukter ved behov. Foreninger for stomiopererte finnes i nesten alle land, husk å ta med adresser. Disse kan du få av din lokale stomiforening (NORILCO).

Klær

Bruk klær du liker, og som du brukte før du ble operert. Mange ønsker å bruke vide klær for å skjule stomien, men i de fleste tilfeller ser ingen at du har stomiutstyr. Enkelte ganger føles det riktig å ta hensyn til stomiens plassering med tanke på f.eks. bukselinning.



Kosthold

Det er få urostomiopererte som trenger å gjøre store forandringer i matvanene.

Tommelfingerregel:

Spis sunn og variert kost til faste tider.

HUSK:

- Tygg maten godt.
- Spis regelmessig.
- Spis fiberrik mat som f.eks. grovt brød, grønnsaker og frisk frukt.
- Fordi du også er operert på tarmen,

kan du få mageknip om du spiser nøtter og trevlet mat. Eksempler på dette er; appelsinkjøtt, stangselleri, asparges, druer med stener, rabarbra, tomatskinn og sjampinjong. Prøv deg frem med små mengder av dette, og tygg maten godt.

- Enkelte har erfaring med at tranebærjuice eller kapsler kan minske slimproduksjon og forebygge urinveisinfeksjon.





Seksualitet og samliv

Etter en stomioperasjon blir mange reddet for at de ikke lenger kan leve som normalt. Det kan være vanskelig å venne seg til tanken at man skal ha en stomi resten av livet. Urostomien bør ikke hindre deg i din omgang med andre mennesker. Jo raskere du kommer tilbake til ditt daglige liv, jo bedre. Starten kan være litt tung, men litt etter litt vil du oppdage at det er mulig å leve et normalt liv med en urostomi. Den erfaringen har de aller fleste stomiopererte gjort seg.

Ved intimt samliv er det oftest slik at partneren på forhånd vet at du har urostomi. Det er viktig å sette ord på de tanker og følelser du har i forbindelse med stomien. Dette vil gjøre det enklere både for deg og din partner å venne seg til den.

For å forstå hverandres verden, er det viktig at dere snakker sammen om din livssituasjon. Noen stomiopererte synes kanskje at posen kan være en hindring for seksuelt samvær, men ikke la posen være "problemet". Kanskje er det du som har hemninger, mens din partner aksepterer stomien og håper at du også vil gjøre det. Et godt seksualliv handler om så mye mer enn selve samleieakten: kjærlighet, nærhet og forståelse, og ikke minst – våge å være seg selv er viktige elementer for å få et godt seksualliv, også etter stomioperasjonen.

Urostomien i seg selv er ingen hindring for et normalt seksualliv og vil sjelden være til hinder for graviditet, svangerskap og fødsler.

Hos enkelte kvinner kan det oppstå smerte i forbindelse med samleie. Søk hjelp hos din stomisykepleier eller lege.

For menn som opplever impotens finnes det flere typer hjelpemidler. Årsaken kan være enten fysisk eller psykisk begrunnet. Ta kontakt med din stomisykepleier eller urolog.

Praktiske tips:

- Tøm eller bytt pose før samleie.
- Sørg for at posen er ordentlig festet, tape eventuelt bunnen av posen fast på kroppen.
- Skift gjerne til en mindre pose.
- Dekk eventuelt posen med en overtrekkpose.
- Bruk andre stillinger enn "misjonærstillingen", hvis det trykkes for mye på posen.

Prøv dere frem. Det er ikke nødvendig med spesielle samleiestillinger på grunn av stomien, men det er klart at posen blir mer merkbar og utsettes for større påkjenninger i enkelte stillinger.

Etterhvert som man blir eldre er det helt naturlig at den seksuelle aktiviteten gradvis avtar, men det å ha omsorg og omtanke for hverandre vil alltid være viktig i et godt samliv.



Praktisk informasjon

- Alle bandasjer, hudpleiemidler og andre ting du trenger for å stelle din stomi er refusjonsberettiget. Din blå resept kan brukes på apotek og hos bandagist (forretning for sykepleie-artikler). Du betaler kun en liten egenandel.
- Det er lurt å bestille nye produkter minst 2 uker før du går tom.
- Dersom du kan dokumentere mer utgifter utover en viss størrelse kan du søke om grunnstønad, ta kontakt med NAV. Sosionomer/NAV kan hjelpe deg med dine sosiale og økonomiske rettigheter.

Det er viktig at du selv velger den bandasjen du liker best, trives med og kan håndtere. Spør gjerne din stomisykepleier om råd. Det kan finnes mange mennesker og pårørende i dine omgivelser, som kan gi deg hjelp og støtte slik at tilværelsen din skal bli så bra og behagelig som mulig.

Helsepersonell på den avdelingen du kommer til etter operasjonen, vil lære deg å stelle stomien og gi deg råd og veiledning. Dersom du trenger hjelp til stell av stomien eller stomiskift etter at du kommer hjem fra sykehuset, kan du ta kontakt med stomisykepleier eller stomikontakt.

Det kan hende du trenger råd og veiledning vedrørende kosthold og mat, da kan det være nyttig å rådføre seg med en ernæringsfysiolog.

Bandagistens/apotekets ansatte kan gi deg råd om valg av stomiutstyr. Produsentene av stomiutstyr kan også kontaktes ved spørsmål og veiledning av produktene, etter operasjonen.

Norilco/støtteordninger

NORILCO – Norsk Forening for stomi- og reservoaropererte og LMF - Landsforeningen mot fordøyelses-sykdommer, kan hjelpe og støtte deg som medmenneske. NORILCO har egne stomirådgivere. Nesten alle medlemmer er selv stomiopererte og deler gjerne sine erfaringer med andre.



Hudpleie og stomistell

Stell av huden er en viktig del av pleien, den skal bevares hel, ren og tørr.

Når operasjonssåret har grodd skikkelig, kan du dusje og bade som du gjorde før. Du trenger ikke å ha bandasje på stomien når du dusjer.

Ta kontakt med din stomisykepleier eller lege, dersom du får sår hud eller trenger råd om hudpleie.

Stell av stomien ved stomiskift

- Huden rundt og inntil stomien vaskes med vann. Eventuelt kan du bruke en uparfymert såpe med lav pH-verdi.
- Skyll nøye med lunkent vann. Såperester kan gi hudirritasjoner og allergi.
- Tørk godt og bruk en myk kompress, men ikke skrub. Stomien kan blø litt, med dette er ufarlig.
- Sett på nytt stomiutstyr på ren og tørr hud.
- Huden har godt av å bli lufttørket en gang iblant.
- Bruk kun spesialkremer rundt stomien dersom huden er rød/tørr.
- Er det noen hår rundt stomien, kan du barbere bort disse. Det er mest hygienisk å bruke engangshøvel og husk å barbere "medhårs".



En frisk stomi skal være rød og huden rundt bør se ut som huden på resten av magen.

Enkelt stomiskift

1-dels bandasje

På en 1-delsbandasje er hudkleberen festet fast til posen. Du bytter hele posen inn til stomien ved hvert poseskift. Posen skiftes vanligvis hver dag.



SenSura Mio Click

2-dels bandasje

Bandasjen består av to deler – hudplate og pose. Først settes platen på huden og deretter festes posen til platen. Platen og posen byttes ved behov. Det vanlige er å bytte platen 2-3 ganger i uken, mens du bytter posen hver dag.



Coloplast Uro minicap

Ha alt utstyr klart før du starter

Når man har urostomi bruker man en tømbar pose. Posen byttes ved behov. Det er viktig at bandasjen holder tett rundt stomien, ellers kan lekkasje og hudirritasjon oppstå. Tetningsringer og pasta gir en tett og god bandasjering.

- Finn frem: Stomiutstyr, evt stomimal, saks, tusj, kompresser, vann og avfallspose.
- Mål stomien og klipp til hullet dersom du bruker oppklippbar hudplate. Klipper du etter en mal, er det viktig å sjekke innimellom at malen passer, stomien kan forandre seg over tid.
- Ha klart eventuelle tilleggsprodukter som barriere krem, tetningsring og ekstra tape.



Coloplast Uro mikropose og urinpose



SenSura Mio Flex 2-dels urostomipose

Praktisk tips

Det er en fordel å skifte platen før frokost, p.g.a. mindre urin i blæren.

Stell av stomien og hudpleie

Følg trinnene for stell av stomien. Sørg for at huden er rengjort og tørr før påføring av nytt stomiutstyr. Bruker du 2-dels utstyr er det lurt å tørke av

hudplaten før påsetting av ny pose. Hvis huden er spesielt tørr, smør på et tynt lag med barriere krem. La dette trekke inn i huden i 1-2 min. og tørk av det overskytende.

Klargjøring av urostomiposen

Sørg for at utløpet på urostomiposen er lukket før du tar den i bruk.



Ta av beskyttelsespapiret på hudplaten/posen



2-dels hudplate



1-dels pose

1-dels pose



1. For å sikre perfekt tilpasning rundt stomien bretter du posen bakover, trykker fast mot huden nedenfra, og jevner ut oppover med fingrene.

Påføring av hudplate/pose



2. Se til at hudplaten festes riktig rundt stomien. En god teknikk er å brette hudplaten bakover, stryk fast mot huden nedenfra og jevn ut oppover med fingrene. Stryk fast mot huden for å sikre at hudplaten fester godt.

Festing av pose på hudplate



2-dels Flex kleberkobling

2-dels Click ringkobling

3. Bruker du 2-dels utstyr, så fester du nå posen til hudplaten. Plasser posen nederst på hudplaten og følg den blå linjen eller ringkoblingen i ytterkant på hudplaten.



4. Før fingrene over posen for å sikre at den sitter fast på platen.

Tømming av urostomipose



Det kan være praktisk å sitte på toalettet eller stå vendt mot toalettet ved tømming av stomiposen. Etter tømming kan du rengjøre utløpet med kompress/toalettpapir og vann. Lukk igjen utløpet som tidligere anvist.

Fjerning av hudplate/stomipose



2-dels hudplate



1-dels pose

Ta tak i den hvite fliken på hudplaten. Trykk lett mot huden med en hånd, samtidig som du forsiktig drar hudplaten/posen av med den andre hånden. Bruk gjerne en fuktig kompress eller kleberfjerner spray for å løsne mer skånsomt.

Brukt stomiutstyr kastes som vanlig avfall.

Stomitolbehør



Stomitolbehør er produkter som er utviklet for å redusere lekkasje og ta vare på huden din.

Barrierefilm spray og serviett

Reduserer hudproblemer som følge av avføring eller hudklebere, da den skaper en beskyttende hinne på huden. Barrierefilmen svir ikke og den påvirker ikke klebeevnen. Både spray og servietter tørker på sekunder, så ny hudplate kan settes på nesten med en gang.

Tetningsring

Skaper en langvarig og tett forsegling mellom stomien og stomiutstyret. Den er enkel å bruke, form den etter huden rundt stomien og sett den på. Hudplaten festes oppå tetningsringen.

Elastisk tape

Mange med stomi bekymrer seg for eller har opplevd at kantene på hudplaten løsner. Elastisk tape er utviklet for å holde hudplaten din trygt på plass og likevel gi deg bevegelsesfrihet. Tapen oppnår dette fordi den er elastisk. Det kan bety økt trygghet og lengre brukstid for stomiutstyret ditt.

Kleberfjerner spray

Når man skifter hudplate kan man oppleve litt ubehag og sårhet i huden. Kleberfjerner spray hjelper til med å fjerne hudplaten når du skifter stomiutstyr. Den skånsomme sprayen kan brukes så ofte man ønsker uten at den skader huden. Sprayen svir ikke og den tørker på sekunder.

Hudpleietips

Hudpleietips ved sår hud

Har du allerede fått sår hud er det viktig å finne årsaken og selvfølgelig gjøre noe med det. Er du i tvil må du ta kontakt med fagpersoner som kan hjelpe deg.

Hudbeskyttelsesplate, belte, tetningsringer, pasta (uten alkohol) og barriere-krem er midler som kan være til hjelp ved lekkasje eller sår hud.

Trening etter en stomioperasjon



Fysisk aktivitet i 30 minutter om dagen har mange positive helsegevinster. Det kan bidra til mer energi i hverdagen og redusere stress.

Etter en operasjon er det viktig å få kroppen i gang igjen, men du bør starte forsiktig. Målet kan være at du skal komme tilbake til det aktivitetsnivået du hadde før operasjonen. Dersom operasjonen er planlagt kan det være en fordel, så fremt man klarer, å ha et godt aktivitetsnivå i forkant av operasjonen. Dette kan hjelpe deg å komme raskere tilbake etter operasjonen.

Tips som kan bidra til økt daglig aktivitet

Ved å øke hverdagsaktiviteten kan man oppnå gode helsegevinster, helse- direktoratet anbefaler 30 minutter fysisk aktivitet om dagen. Dette kan

gjennomføres på flere måter, her kommer noen enkle tips;

- Gå en kort tur hver dag.
- Start pent og øk etter hvert.
- Velg aktiviteter du liker å gjøre.
- Gå trapper i stedet for å ta heisen.
- Velg en parkering litt lenger unna når du skal i butikken.
- Gå av bussen en stopp tidligere enn du pleier, og gå siste biten.
- Avtal med andre om å gå tur sammen.



Få gratis flyer med treningsøvelsene

Den kan du ha liggende i treningsbagen eller ta frem når du skal gjøre øvelsene. Bestilles på 22 57 50 20 eller www.coloplast.no/brokk

EGNE NOTATER



Legen som opererte meg:

Sykehus:

Min stomisykepleier:

og treffes på telefon:

Telefontid:

Min lokale NORILCO avd.:

Adresse:

Telefon:

Min kontaktperson i NORILCO:

Adresse:

Telefon:

Telefontid:

[illegible]

Notater



"Selv om livet med en stomi ikke alltid er enkelt, bør stomien aldri begrense deg!"



Kundeservice

Våre sykepleiere svarer på spørsmål og gir produktveiledning på telefon.



Produktveiledning

Tilgang til vareprøver når du ønsker det.



Nettside og e-post

En nettside for stomiopererte og e-poster med artikler og råd som er relevant for deg i din situasjon.



Stomi selvtest

Bruk stomisjekken jevnlig for å finne ut om du har gode rutiner og riktig tilpassede produkter.

Coloplast Assistanse er et støtteprogram for personer med stomi. Vi gir deg en hjelpende hånd, samt råd og inspirasjon til ditt daglige liv.

Registrer deg i dag!
www.coloplast-assistanse.no

 Coloplast®
Assistanse

Coloplast utvikler produkter og tjenester som gjør livet enklere for mennesker med personlige medisinske behov.

Vi samarbeider tett med med brukere av våre produkter og utvikler løsninger tilpasset deres behov. Vi kaller dette intimsykepleie.

Våre forretningsområder inkluderer stomi, urologi og kontinens, hud- og sårpleieprodukter. Vi er et internasjonalt selskap med over 12 500 ansatte.

Ostomy Care
Continence Care
Wound & Skin Care
Interventional Urology

Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S © 01-2021
Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark
Nr. 440N00003



Coloplast Norge AS
Postboks 162 Manglerud
0612 Oslo
Telefon 22 57 50 00
www.coloplast.no
Følg oss på Facebook