



Irrigasjonsprodukter

- Frihet og diskresjon
- Selvkontroll
- Komplett irrigasjonssystem




Coloplast irrigasjonsprodukter

Irrigasjon er selvkontroll

Irrigasjon kan anvendes av colostomiopererte med en sigmoideostomi og gir muligheten for å gjenvinne kontrollen over tarmuttømmingen. Ved irrigasjonsmetoden oppnår den stomiopererte større frihet og diskresjon. Frihet – fordi den stomiopererte har mulighet for å bruke mer diskrete bandasjer. Diskresjon – fordi mengden av luft fra stomien som regel minskes betydelig.

Enkel i bruk

Coloplast irrigasjonsprodukter er enkelt å bruke. Etter instruksjon og opplæring av en stomisykepleier er den stomiopererte selv i stand til å irrigere hjemme.

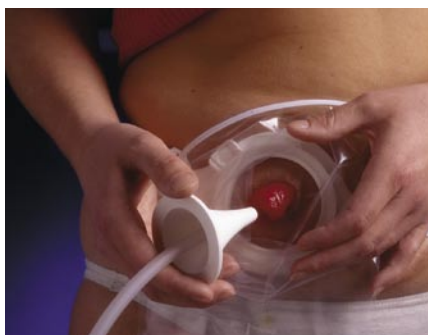

Vannposen har et innebygget termometer til å avlese vannets temperatur. Den korrekte vanntemperaturen skal være mellom 36-38°C. Posen er dessuten utstyrt med en måleenhet for å sikre korrekt mengde vann.

Vannets innløpshastighet kontrolleres enkelt ved hjelp av regulatoren – selv for stomiopererte med dårlig fingermotorikk.



Coloplast irrigasjonssett består av en vannpose og et kon. Settet leveres i en praktisk toalettmappe. Irrigasjonspose bestilles separat.



Diskré bandasjer

For å få størst mulig glede av å irrigere anbefales det å benytte en liten diskre bandasje mellom hver gang man irrigerer. Coloplast har et sortiment av Assura Con Seal stomipropper med to ulike lengder og to ulike størrelser. I tillegg finnes det diskre stomiposer som Assura minicap og SenSura Mio 1-delte poser i ulike størrelser.

Sortimentoversikt Irrigasjonsprodukter

- | | |
|------|---|
| 1501 | Coloplast irrigasjonssett (vannpose og colotip) |
| 1511 | Vannpose med termometer |
| 1110 | Colotip med slange |
| 1003 | Irrigasjonspose m/kleber 1-delt |
| 1435 | Assura Con Seal stomipropp 35mm |
| 1445 | Assura Con Seal stomipropp 45mm |
| 1485 | Assura Con Seal stomipropp 35mm |
| 1495 | Assura Con Seal stomipropp 45mm |