

Coloplast *Fistel*

og sårdrenasjesystem

- *Lett å håndtere*
- *Hudvennlig og fleksibel kleber*
- *Bedre pasientkomfort*
- *Finnes i tre størrelser*
- *Lang bæretid*





Coloplast

Fistel og sårdrainasjesystem

Oppblåsbar ring

Den oppblåsbare ringen er plassert rett under koblingen. Den hindrer væske i å renne ut under bandasjeringsring, og gjør påsetting av det fleksible lokket lettere. Den oppblåsbare ringen kan blåses opp med den vedlagte pumpen.



Klippeguide

Det er veldig viktig at bandasjen tilpasses nøyaktig til såret. Derfor er klippeguiden spesielt designet så det er lett å klippe til kleberens.



Fleksibelt lokk

Lokket er lett å sette på og ta av, og gjør det mulig å observere sår og fistel. Det fleksible lokket har også et filter.



Utløp

Utløpet har en myk utløpsventil som gjør det lett å tømme posen for fistel og sårsekret. Utløpet har også en tilbakeslagsventil som hindrer væsken å renne tilbake i såret.



Nattdrainasjepose

Nattdrainasjeposen rommer inntil to liter væske og kan benyttes ved store mengder sekret. Posen er spesielt designet så den lett kan kobles til **Coloplast** Fistel og sårdrainasjesystemets utløp.



Drenasjeventil

Drenasjeventilen er lett å feste på lokket og gir mulighet til å innføre et kateter.



Coloplast Fistel og sårdrainasjesystem fås i størrelsene mini, midi og maxi poser. Drenasjeventil, løse lokk og nattdrainasjepose kan kjøpes separat. Se på sortimentoversikten.

Mange utfordringer ved fistelbandasjering

For mange sykepleiere er det en stor utfordring å bandasjere fistler. Coloplast har i tett dialog med stomisykepleiere erfart et stort behov for en innovativ løsning for å løse disse utfordringene. Ifølge de tilbakemeldinger vi har fått skal løsningen blant annet kunne oppfylle følgende behov:

- Lett å håndtere
- En hudvennlig og fleksibel kleber
- En stor klebeflate
- Flere størrelser
- Lang bæretid
- Alt-i-ett system

Mindre tid på bandasjering

Coloplast Fistel og sårdrainasjesystem er et "alt-i-ett" system som er tidsbesparende for sykepleieren.

Holdbar kleber

Den myke og fleksible 2-lags kleberens er formbar. Kleberens er utvaskingsresistent og har en lang bæretid. Kleberens følger kroppens forskjellige konturer og tilpasser seg lett hudfolder og ujevnheter.

Kleberens består av to lag. Det nederste laget inn mot huden er formbart og gir en tett forsegling. Det øverste utvaskingsresistente laget hindrer rask oppløsning av kleberens.



Coloplast Norge AS
PB 6287 Etterstad
0603 Oslo
Telefon 22 72 06 80
Telefax 22 72 06 84

www.coloplast.no