



Tryggheten med SenSura® Click starter med den enkle påsettingen

 Før du bruker produktet bør du alltid kikke på bruksanvisningen som ligger i produktesken.

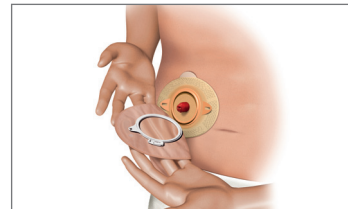


Koble posen til hudplaten

Start nedenfra og fest koblingen på posen til koblingsringen på hudplaten.

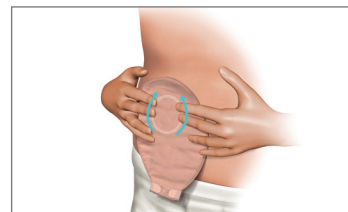


Feste posen til hudplaten

Bruk begge hender og la fingrene gli rundt koblingsringen slik at koblingen fester.

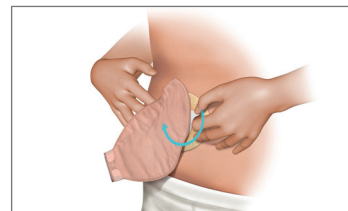


Mulig å vri posen til ønsket plassering

Hold på hudplaten med den ene hånden mens du samtidig vrir forsiktig på posen ved hjelp av det myke "øret" på toppen av koblingen på posen.

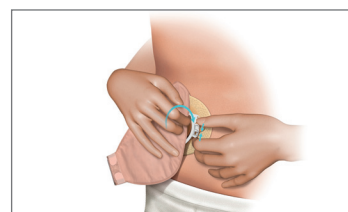


Låse koblingen

Flytt låseringen til foretrukket posisjon og lukk den. Et hørbart "klikk" indikerer at posen er sikkert festet til hudplaten.

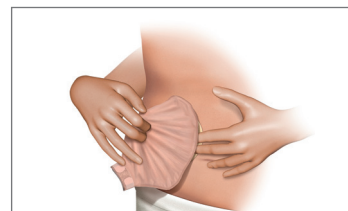

Mulighet til å dobbeltsjekke sikkerheten

Hold på hudplaten med den ene hånden og dra posen forsiktig utover for å dobbeltsjekke at posen er godt festet.

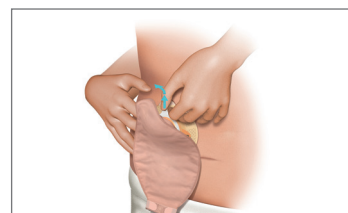

Fjerne posen fra hudplaten

Åpne låseringen ved å trykke på den lille knappen med fingertuppen. Ta tak i det myke "øret" på posen og dra den opp og bort fra hudplaten.

Referanser

1. Steen, A. (2012) "Coloplast Ostomy Days November 2012", Memorandum
2. Nybaek, H & Jermec, GBE (2010) "Skin problems in stoma patients", Journal of European Academy of Dermatology and Venereology, 24, 249-257
3. DialogueStudy, 2010
4. Welser, M et al. (2009) "A comparative study of two-piece ostomy appliances", British Journal of Nursing, Vol 18, No 9

Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care

Coloplast utvikler produkter og tjenester som gjør livet enklere for mennesker med personlige medisinske behov. Vi samarbeider tett med brukere av våre produkter og utvikler løsninger tilpasset deres behov. Vi kaller dette intimsykepleie. Våre forretningsområder inkluderer stomi, urologi og kontinens, hud- og sårpleieprodukter. Vi er et internasjonalt selskap med over 7000 ansatte.

Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S. © 2013-05
Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark.

 **Coloplast**

Coloplast Norge AS
Ryenstubben 10
Postboks 162 Manglerud
0612 Oslo


www.coloplast.com

SenSura®

 **Coloplast**

Coloplast for trygghet

SenSura® Click - Trygghet til å leve et aktivt og variert liv

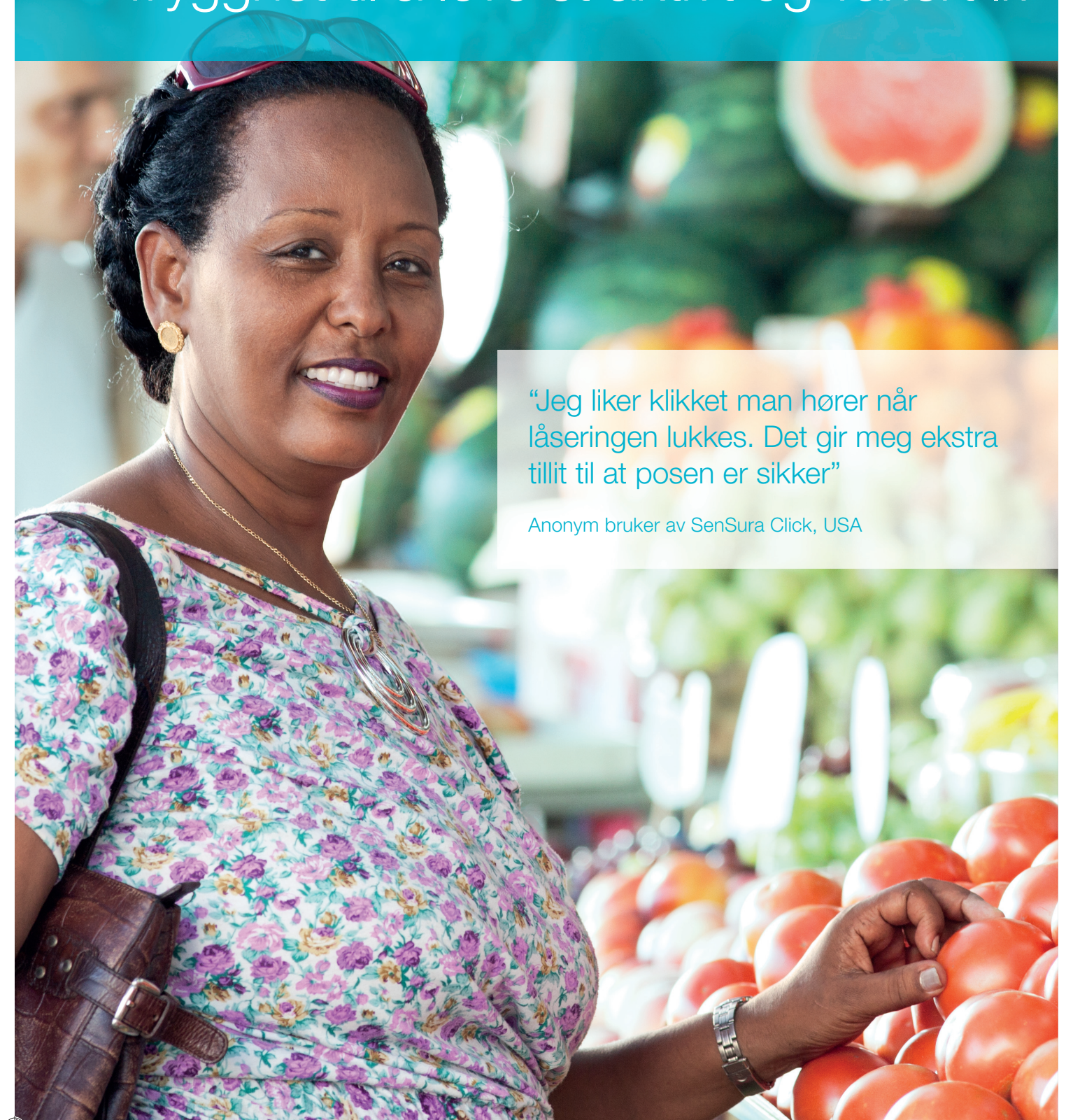

"Jeg liker klikket man hører når låseringen lukkes. Det gir meg ekstra tillit til at posen er sikker"

Anonym bruker av SenSura Click, USA

Utfordringen ved å ha valgfrihet uten at det går på bekostning av sikkerhet eller frisk hud

“Man forventer frihet til å bytte mellom forskjellige typer og størrelser av poser¹ samtidig som huden skal holde seg frisk og man føler seg trygg”.

Peristomale utfordringer gjør at det kan være en vanskelig å oppfylle disse forventningene.

Peristomal irritasjon på grunn av mekanisk traume er et vanlig hudproblem². Det kan oppstå på grunn av:

- Hyppige stomiskift² på sensitiv hud

Et to-dels system med mekanisk kobling og et hørbart ”klikk” møter disse utfordringene

- Fører til færre skift av hudplate og reduserer forekomsten av mekanisk traume³, samtidig som man har friheten til å velge posetype og størrelse oftere
- Et hørbart ”klikk” gir en følelse av trygghet
- Ideell for alle tre peristomale kroppsprofiler: vanlig, innover og utover




Vanlig

Stomien ligger mer eller mindre i hudnivå



Innover

Stomien ligger under hudnivå og lager en grop

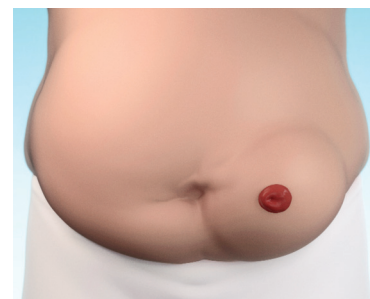

Utover

Stomien står ut fra magen og lager en topp

SenSura® Click - ideell for personer som verdsetter friheten til å skifte posetype, samtidig som man føler seg sikker/trygg

Kobling med låsering

Skånsom påsetting

Minimerer presset mot buken gjennom skånsom kobling av posen til hudplaten.

87% sier faktisk at presset mot buken ved påsetting av posen ikke plaget dem i det hele tatt⁴

Klikk-lyden

Gir en hørbar garanti om at posen er sikkert festet til hudplaten.

80% sier at det hørbare klikket er veldig tydelig⁴




Tolagskleberens sikkerhet

Beskyttelseslag

Beskytter huden mot stomiinnhold

Det hudvennlige laget

Sørger for å holde huden frisk ved å absorbere overflødig fuktighet

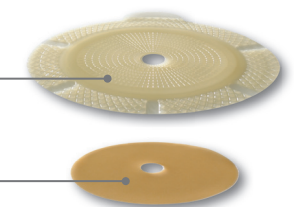

SenSura Click kan brukes i kombinasjon med en rekke størrelser og typer av poser

Colostomi

- Mini, midi, maxi
- Minicap
- Irrigasjonspose



Ileostomi

- Mini, midi, maxi
- Magnum
- Nattdrenasjepose for mye stomiinnhold



Urostomi

- Midi, maxi
- Minicap
- Mikropose med konektor til nattpose

