



Tryggheten med SenSura® Flex starter med den enkle påføringen


Før du bruker produktet bør du alltid kikke på bruksanvisningen som ligger i produktesken.

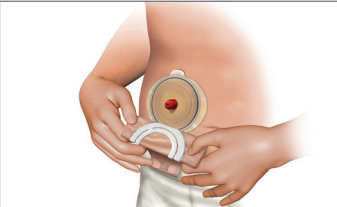


Koble posen til hudplaten
Sørg for at den bevegelige festeplaten på hudplaten er helt ren og tørr. Start nedenfra og fest den ytre koblingen på posen etter den blå linjen på kanten av hudplaten. Noen syns det er enklere å starte på toppen av hudplaten isteden.

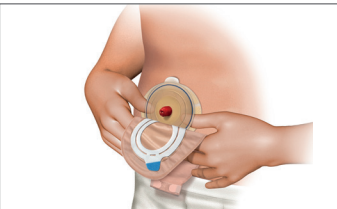


Feste posen til hudplaten
Bruk begge hender og putt tomlene under den bevegelige festeplaten.

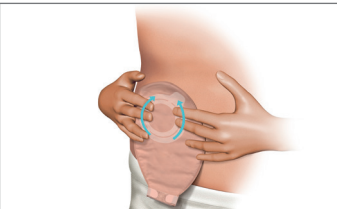


Deretter brukes fingrene til å feste posen forsiktig i riktig posisjon, innenfor den blå linjen. Det er mulig å justere posen med en gang den er satt på – noe som gjør det mulig å korrigere posens plassering dersom den er festet utenfor den blå linjen.

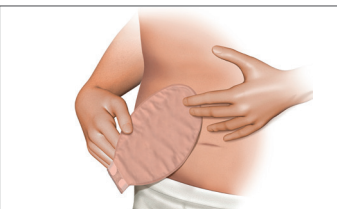

Mulighet til å justere posen til ønsket posisjon
Posen kan også sikres i en posisjon om ønskelig.

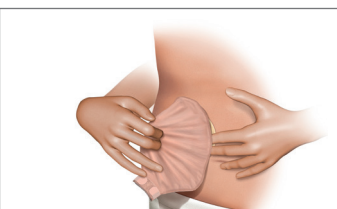

Mulighet til å dobbeltsjekke sikkerheten
Hold på hudplaten med en hånd og dra posen forsiktig utover for å dobbeltsjekke kleberkoblingens sikkerhet.

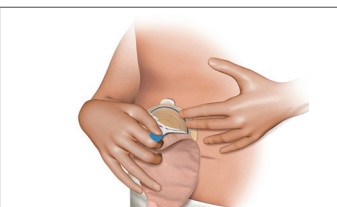

Fjerne posen fra hudplaten
Hold en hånd på den bevegelige festeplaten og fjern posen ved å dra i det blå øret med den andre hånden. Gjør dette skånsomt slik at posen løsner enkelt fra platen.



Sensura Flex dobbelt filter
2-dels kleberkobling for colo- og ileostomiopererte

Sensura Flex hudplater, med og uten konveksitet

FLAT HUDPLATE		CONVEX LIGHT HUDPLATE	
• 35 mm oppklippbar, 10-33 mm	101010	• 35 mm oppklippbar, 15-23 mm	113010
• 50 mm oppklippbar, 10-48 mm	101020	• 50 mm oppklippbar, 15-33 mm	113020
• 70 mm oppklippbar, 10-68 mm	101030	• 50 mm oppklippbar, 15-43 mm	113030
• 90 mm oppklippbar, 10-88 mm	101080	• 70 mm oppklippbar, 15-56 mm	113070
• 35 mm, ferdigstanset hull 21 mm	101110	• 35 mm, ferdigstanset hull 21 mm	113120
• 35 mm, ferdigstanset hull 25 mm	101120	• 50 mm, ferdigstanset hull 25 mm	113130
• 35 mm, ferdigstanset hull 28 mm	101130	• 50 mm, ferdigstanset hull 28 mm	113140
• 50 mm, ferdigstanset hull 25 mm	101140	• 50 mm, ferdigstanset hull 31 mm	113150
• 50 mm, ferdigstanset hull 28 mm	101150	• 50 mm, ferdigstanset hull 35 mm	113160
• 50 mm, ferdigstanset hull 31 mm	101160	• 50 mm, ferdigstanset hull 38 mm	113170
• 50 mm, ferdigstanset hull 35 mm	101170	• 50 mm, ferdigstanset hull 41 mm	113180
• 50 mm, ferdigstanset hull 41 mm	101180		

SenSura Flex Xpro hudplater, med og uten konveksitet

FLAT HUDPLATE		CONVEX LIGHT HUDPLATE	
SenSura Xpro 35mm 10-33	101040	SenSura Xpro Convex Light 35mm 15-23mm	113040
SenSura Xpro 50mm 10-48	101050	SenSura Xpro Convex Light 50mm 15-33mm	113050
SenSura Xpro 70mm 10-68	101060	SenSura Xpro Convex Light 50mm 15-43mm	113060
		SenSura Xpro Convex Light 70mm 15-53mm	113080

2-dels lukket pose til colostomi

	BEIGE				KLAR
	Mini	Midi	Maxi	XXL	Maxi
• SenSura Flex 35 mm	132240	132040	132140		
• SenSura Flex 50 mm		132050	132150		132120
• SenSura Flex 70 mm			132180		132170
• SenSura Flex 90 mm				132910	

2-dels tømbar pose til ileostomi

	BEIGE				KLAR
	Mini	Midi	Maxi	XXL	Maxi
• SenSura Flex 35 mm	149140	149240	149340		
• SenSura Flex 50 mm		149250	149350		149320
• SenSura Flex 70 mm			149380		149370
• SenSura Flex 90 mm				149910	

Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care

Coloplast utvikler produkter og tjenester som gjør livet enklere for mennesker med personlige medisinske behov. Vi samarbeider tett med med brukere av våre produkter og utvikler løsninger tilpasset deres behov. Vi kaller dette intimsykepleie. Våre forretningsområder inkluderer stomi, urologi og kontinens, hud- og sårpleieprodukter. Vi er et internasjonalt selskap med over 7000 ansatte.

Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S [2013-06]
Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark
CRM-nummer: 440N00147

Coloplast Norge AS
Ryenstubben 10
Postboks 162 Manglerud
0612 Oslo
Telefon 22 57 50 00

SenSura®

Coloplast for sikkerhet

SenSura® Flex
- Trygghet til å leve et aktivt og variert liv



“Jeg må ha et produkt som kan tillate meg å svømme, sykle og løpe, samt tåle både vann og svette ”

Bruker av SenSura Flex, Danmark¹

Referanser:

1: (2013) "It is about flexibility and security", Stomi Informationen 1/2013.
2,3: Arnaud, J et al. (2008) "A randomized crossover study of a new two-piece adhesively coupled ostomy pouching system", Presentert på World Council of Enterostomal Therapists (WCET) kongressen i Ljubljana, Slovenia, 15. - 19. juni 2008.

Coloplast Norge AS
Ryenstubben 10
Postboks 162 Manglerud
0612 Oslo
Telefon 22 57 50 00

www.coloplast.no


Utfordringen ved å ha fleksibiliteten og diskresjonen til et endels produkt, men i et todels system

Noen foretrekker et endels system på grunn av ønske om mer fleksibilitet og diskresjon, mens et todels system kanskje passer livsstil og kroppsprofil bedre:

- Foretrekker færre skift av hudplate
- Ømfintlig hud
- En livsstil som krever en kobling som er fleksibel når man bøyer seg
- Stomien ligger i bøyelinjen eller i dype folder
- Noen tilfeller av kroppsprofilen ”utover”
- Begrenset plass på magen

Et todels system med en oval hudplate, kleberkobling og en bevegelig festeplate møter disse utfordringene


- Gir færre skift av hudplate
- Kleberkoblingen er fleksibel
- Hudplaten følger kroppens konturer, mens en bevegelig festeplate sørger for at koblingen forblir i en stabil posisjon
- Der hvor det er et innsnitt eller behov for drenering kan den ovale hudplaten med det store klippeområdet også brukes på høykant

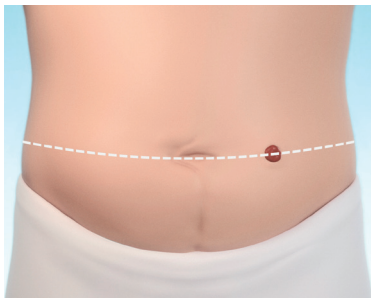

I bøyelinjen
Stomien ligger der hvor magen folder seg når man bøyer seg



Dype folder
Området har dype folder med løs hud eller overflødig fett

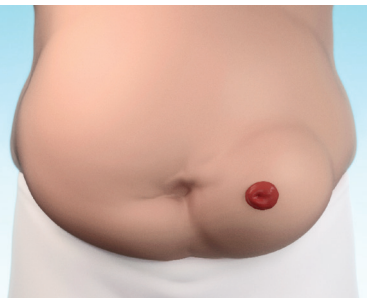

Utover
Området står ut fra magen og lager en topp

SenSura® Flex – ideell for personer som verdsetter nytten av et endels produkt med fordelene ved et todels produkt

Fleksibel trygghet

Ubegrenset bevegelsesfrihet
Den myke og fleksible koblingen kombinert med den bevegelige festeplaten tilpasser seg individuelle kroppskonturer og holder posen i en stabil posisjon.

69% sier at koblingssystemets fleksibilitet er veldig god eller god².

Bekvem og diskret
Et trygt koblingssystem som er flatt og diskret uten harde elementer, samt enkelt å bruke.


71% sier at håndtering av koblingssystemet er veldig enkelt eller enkelt³.



Tolagskleberen

Beskyttelseslag
Beskytter huden mot stomiinnhold

Hudvennlig lag
Holder huden sunn og frisk ved å absorbere overflødig fukt

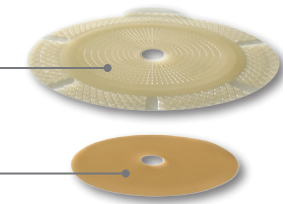


SenSura Flex, et komplett sortiment som dekker dine behov

Poser
Colostomi: mini, midi, maxi
Ileostomi: mini, midi, maxi
Urostomi: midi, maxi

Hudplater
Standard hudplate: flat, convex light
Xpro hudplate: flat, convex light – for ekstra beskyttelse mot aggressivt stomiinnhold

SenSura® Flex dobbelt filter

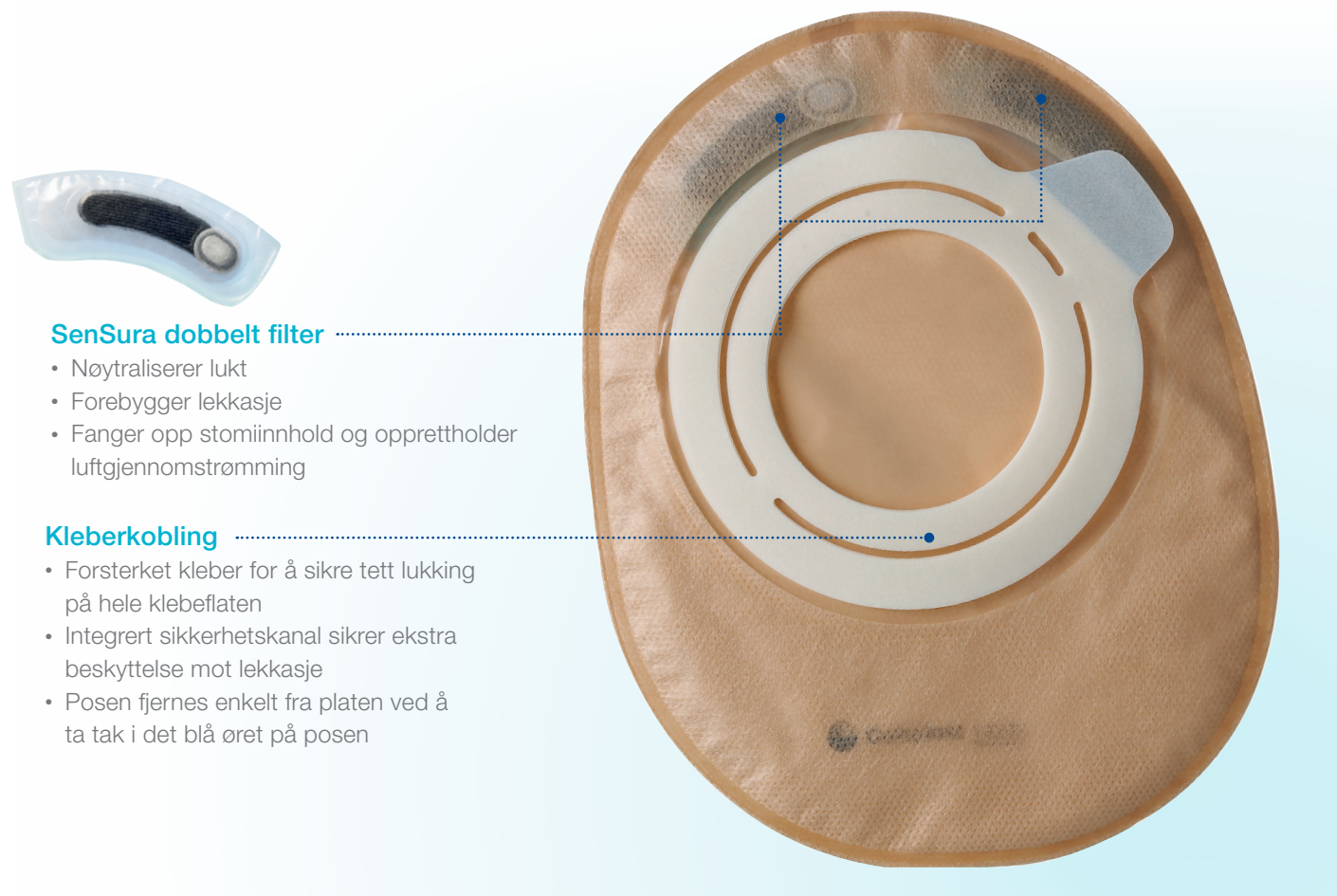

SenSura dobbelt filter

- Nøytraliserer lukt
- Forebygger lekkasje
- Fanger opp stomiinnhold og opprettholder luftgjennomstrømming

Kleberkobling


- Forsterket kleber for å sikre tett lukking på hele klebeflaten
- Integrert sikkerhetskanal sikrer ekstra beskyttelse mot lekkasje
- Posen fjernes enkelt fra platen ved å ta tak i det blå øret på posen

Godt synlig klippeguide

- Klare blå streker og størrelser indikerer hvor det skal klippes

Bevegelig festeplate

- Den blå tydelige streken i ytterkant av festeplaten gjør det enkelt å plassere posen på platen
- På grunn av den bevegelige festeplaten er det ikke behov for å bruke ekstra press når posen settes på

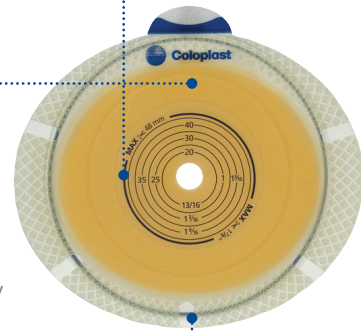

Tolagskleber

- Det nederste laget mot huden er hudvennlig og absorberer fukt fra huden
- Det øverste laget mot posen er utviklet for å beskytte det nederste laget og huden mot stomiinnhold.

Diskret løsning
Borrelåsen øverst på posen muliggjør at posen kan brettes til halv størrelse.

Synlig lukkeanvisning
En fordypning i utløpet viser hvordan utløpet skal brettes.

Hide-away utløp
Utløpet har en sikker, myk og hygienisk lukking. Materialet er lett å rengjøre og blir ikke misfarget.

Hide-away med ekstra sikkerhet
Hide-away utløpet har en borrelås som gjør det mulig å feste utløpet og sikre at utløpet ikke faller ned. Dette gjør posen mer diskret samtidig som utløpet ikke er i kontakt med huden.

